

## Bruksanvisning

Symbolix planeringskalender  
(väggmonterad)

### Produktfakta

Artikelnummer: 502746, 502747

Modell: Veckotavla Färg, Vit

Mått: Ca 60x67 cm

Vikt: 2.6 kg

Material: Whiteboardlaminat, Stålblåt, trä, ram av aluminium

Medicintekniskt klassad produkt enligt MDR 2017/745

### Exempelbild



### Användningsområden

Symbolix är avsedd för personer som har behov av visuellt stöd för att planera sin tid. Symbolix kan användas i hemmet, på jobbet eller i skolan. Symbolix ger användaren möjlighet att få en överblick över sin tids- och aktivitetsplanering, planera återkommande aktiviteter och på ett enkelt sätt ändra sin planering.

### Så använder du Symbolix

På Symbolix kan du med en whiteboardpenna lägga till, ändra och ta bort aktiviteter för att visualisera daglig planering eller veckoplanering. Du kan även åskådliggöra aktiviteter med magnetkort. Det medföljer magnetkort som åskådliggör dagarna. Magnetkort med möjlighet att specialanpassa bildstödet för enskilda användare eller återkommande aktiviteter finns att köpa som tillbehör. Symbolix är indelad i rutnät som används för att dela in schemat. Planeringskalendern monteras på vägg (upphängningstillbehör medföljer).

### Rengöring

Symbolix torkas av med ljummet vatten och en ren trasa. Torka med torr trasa efteråt och vänta tills tavlan är helt torr innan du börjar skriva på den. Om tavlan är väldigt smutsig kan du använda rengöringsmedel avsedd för whiteboard innehållande Isopropanol.

## SÄKERHETS- OCH VARNINGSINFORMATION

Ej lämplig för barn under 3 år och brukare med allvarligt nedsatt kognitiv funktion. Innehåller smådelar.



### Montering



**Montering ska göras av montör med nödvändig erfarenhet/kompetens av denna typ av montering samt bedömning av hållfasthet/infästning i aktuellt väggmaterial för att inte riskera att tavlan lossnar från väggen.** 4 fästen, 4 skruv & plugg medföljer och rekommenderas om Symbolix monteras på gipsvägg.

### Gör så här

- Packa upp alla delar ur förpackningen
- Kontrollera att alla delar finns med.
- Bestäm var tavlan skall sitta och på vilket håll ni vill montera den (tavlan kan monteras lodrätt eller vågrätt).
- Mät och markera ut där tavlan ska sitta.
- Borra hål och använd lämplig infästning för att skruva fast de två större fästena som är avsedd för montering i överkant. Vi rekommenderar att fästena placeras med ca 35-40cm mellanrum för bästa stabilitet.



- Skjut in de två mindre fästena på listen i tavlans underkant som bilden nedan visar (placering ca 5-10cm från tavlans ytterkant):

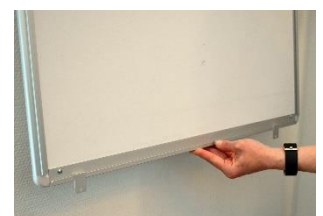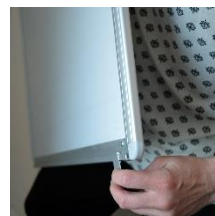

- Häng upp tavlan i de stora fästena.

- Markera och borra hål för infästning för de mindre fästena som hänger i tavlans underkant och skruva slutligen fast dessa.



## Passande Tillbehör

### Medföljande tillbehör

- Symbolix magnetkort veckodagar 7x7cm (7st), färg. **Art.nr:** 504171
- Symbolix magnetisk sudd/pennhållare & whiteboardpenna. **Art.nr:** 504167
- Extra upphängningskit. **Art.nr:** 503064

### Övriga tillbehör (medföljer ej):

- Symbolix magnetkort veckodagar 7x7cm (7st), vita. **Art.nr:** 504163
- Symbolix Mini magnetkort veckodagar 3,5x3,5cm (7st), vita. **Art.nr:** 504161
- Symbolix Mini magnetkort veckodagar 3,5x3,5cm (7st), färg. **Art.nr:** 504169
- Kardborrerundlar (60st). **Art.nr:** 504168
- Symbolix magnetkort svart ram, 8x8cm (56st). **Art.nr:** 502750
- Symbolix Mini magnetkort, svart ram 4x4cm (56 st). **Art.nr:** 503453
- Symbolix magnetkort färgad ram, 8x8cm (56st). **Art.nr:** 502751
- Symbolix Mini magnetkort färgad ram, 4x4cm (56 st). **Art.nr:** 503454

Till alla magnetkort (förutom veckodagar) ingår kardborrerundlar.

**CE** Uppfyller de väsentliga kraven enligt gällande lagstiftning MDR 2017/745